

Wwin·tek

Laser technology for smart medicine

ACCENT™

LA RADIOFREQUENZA

TRATTAMENTO SOTTOCUTANEO NON INVASIVO



ACCENT™ - RADIOFREQUENZA

TRATTAMENTO SOTTOCUTANEO NON INVASIVO



Accent™ - tecnologia all'avanguardia, ideale per qualsiasi pratica estetica.

- Doppia configurazione di manipoli: unipolari (per glutei, pancia ed interno coscia) e bipolari (per viso e collo).
- Manipoli progettati ergonomicamente per procedure non invasive, veloci e facili.
- Abbinamento volumetrico per il riscaldamento superficiale e profondo, senza elettrodi di ritorno.

VANTAGGI UNICI PER L'OPERATORE:

- Procedura dinamica e veloce che permette di coprire grandi aree di tessuto in poco tempo.
- Tecnologia innovativa e versatile, applicabile su tutti i tipi di pelle, comprese quelle abbronzate.
- Non richiede materiale monouso e manutenzione.

VANTAGGI PER I PAZIENTI:

- La procedura è indolore, non è invasiva e non provoca effetti collaterali.
- Risultati di alta qualità in poche veloci sedute.

LA RIVOLUZIONE DELLA RADIOFREQUENZA

Fino ad oggi la soluzione più efficace al problema delle adiposità localizzate e della cellulite è stata la liposcultura: tecnica invasiva, che prevede un vero e proprio intervento chirurgico da eseguirsi in sala operatoria, con anestesia e conseguente decorso post-operatorio.

Le altre tecniche meno invasive, come le soluzioni "chimiche" (creme, iniezioni subcutanee) o "meccaniche" (varie pratiche di massaggi subcutanei), consentono risultati solo temporanei. Rispetto a questi metodi, la **Radiofrequenza di Accent™** rappresenta una vera e propria innovazione. E' una tecnologia estremamente potente e soprattutto non invasiva, che risulta efficace nel trattamento di molte imperfezioni dei tessuti.

Una vera e propria **rivoluzione** contro gli inestetismi della cellulite, le adiposità localizzate, il rilassamento cutaneo su viso e corpo, le cicatrici post-acne, i residui post liposuzione.

MANIPOLO BIPOLARE



INDICAZIONI ESTETICHE:

- Cicatrici post-acne
- Rilassamento cutaneo di viso e collo
- Imperfezioni dei tessuti di viso e collo

RISULTATI:

- Ringiovanimento cutaneo
- Elasticità dei tessuti

Il **manipolo bipolare** si riferisce in modo specifico ai trattamenti estetici relativi a viso e collo. In poche sedute semplici e veloci si ottengono risultati di alta qualità, senza effetti collaterali, disagi e fastidiose sensazioni di dolore. Ne consegue un netto miglioramento dell'elasticità cutanea ed un recupero veloce da parte del cliente.

TRATTAMENTI SICURI ED EFFICACI DELLA PELLE

Accent™ è un sistema *non invasivo*, potenziato con la Radiofrequenza (RF) e progettato per trattare in modo sicuro ed efficace una vasta gamma di imperfezioni della pelle:

- Cellulite
- Riduzione del grasso
- Contrazione della pelle (contro il rilassamento cutaneo)
- Cicatrici post-acne
- Post Liposuzione

MANIPOLO UNIPOLARE



INDICAZIONI ESTETICHE:

- Adiposità addominale
- Cellulite gambe
- Cellulite glutei
- Cellulite braccia
- Cellulite interno coscia

RISULTATI:

- Stimolazione del riassorbimento dei liquidi in eccesso
- Stimolazione della circolazione sanguigna

Il **manipolo unipolare** si riferisce in modo specifico a trattamenti estetici relativi a zone con cellulite o adiposità. In poche sedute semplici e veloci si ottengono risultati di alta qualità, senza effetti collaterali, disagi e fastidiose sensazioni di dolore. Questo trattamento migliora e stimola la circolazione del sangue locale, facilita l'eliminazione dei depositi grassi in eccesso e favorisce il riassorbimento dei liquidi trattenuti e delle tossine.


MECCANISMO DI AZIONE DELLA RADIOFREQUENZA

La tecnologia RF di **Accent™** permette vari tipi di trattamenti della pelle impiegando il riscaldamento volumetrico controllato del tessuto profondo. La tecnologia trasporta energia al derma profondo ed agli strati sottocutanei (5-20 mm) mentre protegge l'epidermide con il raffreddamento diretto e continuo.


Il meccanismo della Radiofrequenza consiste in un innalzamento della temperatura nella zona trattata. L'applicatore attivo, causando una rotazione veloce delle molecole d'acqua, produce un campo elettrico, mentre l'elettrodo sviluppa una carica. La carica varia rapidamente da positiva a negativa. La misura e la forza del campo elettrico dipendono dalla geometria dell'elettrodo e dalla potenza trasmessa attraverso la punta dell'applicatore.

La resistenza intrinseca al movimento di questi ioni produce calore. L'operatore ha la possibilità di cambiare la profondità del trattamento modificando la geometria dell'elettrodo, la potenza trasmessa, il tempo di trasmissione ed il raffreddamento.

ISTOLOGIA TRATTATA CON ACCENT™

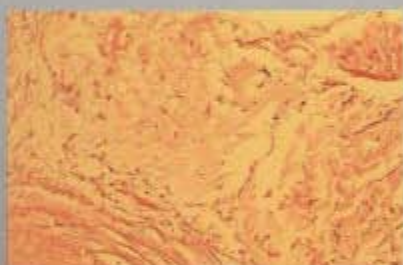

Reperto con colorazione argentica *prima* del trattamento: si evidenzia la *scarsa impregnazione del tessuto* per la diminuzione delle fibre elastiche e del collagene. Con disposizione spaziale irregolare e disordinata.

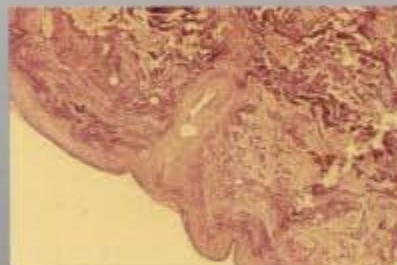

Reperto *dopo 3 mesi* dal termine di un ciclo di 8 sedute, con cadenza bisettimanale, in RF modalità bipolare. Si evidenzia il *notevole incremento dell'impregnazione argentica* da parte del tessuto per la maggiore presenza di fibre elastiche e di collagene con migliore disposizione spaziale.

ACCENT™ TECNOLOGIA RF - RISULTATI OTTIMALI

Il riscaldamento della zona trattata determina diversi risultati:

- Miglioramento e stimolazione della circolazione locale del sangue
- Riassorbimento e drenaggio dei liquidi in eccesso
- Riassorbimento edema locale (gonfiore)
- Effetto calmante sulla pelle
- Riduzione dei depositi grassi
- Ringiovanimento cutaneo
- Riduzione della cellulite
- Elasticità dei tessuti

TRATTAMENTO SOTTOCUTANEO
NON INVASIVO



CASI CLINICI

Di seguito alcuni esempi di casi clinici trattati con il Sistema Accent™

Altri casi clinici, più dettagliati, sono presenti sul nostro sito: www.win-tek.net

Cellulite localizzata su glutei e cosce



Prima



Dopo



Dopo

Adiposità addominale



Prima



Dopo

Adiposità addominale



Prima



Dopo

Cellulite localizzata su glutei e cosce



Prima



Dopo

Rilassamento cutaneo dei glutei



Prima



Dopo

Rilassamento area addominale



PRIMA

DOPO

Rilassamento cutaneo viso e collo



PRIMA

DOPO

Cicatrici da acne



PRIMA

DOPO

Adiposità addominale



PRIMA

DOPO

Adiposità addominale



PRIMA

DOPO

Adiposità interno coscia



PRIMA

DOPO


Cellulite glutei



PRIMA

DOPO

Adiposità addominale

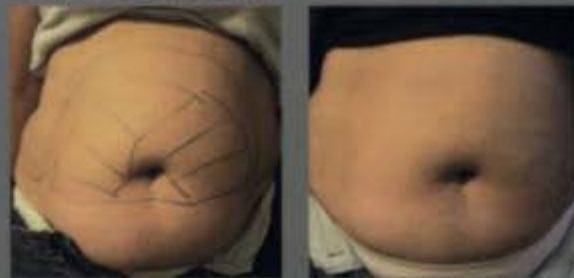

PRIMA

DOPO